

saldatrice manuale per fare e per chiudere sacchetti da sterilizzazione

DNT 25/45



La saldatrice manuale DNT può essere utilizzata per fare sacchetti partendo da bobine di materiale tubolare per sterilizzazione, con o senza soffietti laterali, con larghezza massima cm 25 secondo il modello (qualsiasi lunghezza) e per chiudere i sacchetti dopo che sono stati riempiti.

La saldatrice esegue una saldatura a piattina larga 8 mm in ottemperanza alle norme DIN 58 935-7. Il tempo di saldatura è regolabile per mezzo di un temporizzatore.

Quando viene fatto il sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura si fa scorrere il coltello di taglio posto sulla ganascia superiore.

In fase di chiusura di sacchetto già riempito è sufficiente eseguire la saldatura; oppure si può eseguire anche il taglio, per rifilare eventuali parti eccedenti del sacchetto.

Su richiesta può essere fornito un bancalino d'appoggio.

dati tecnici	
larghezza utile:	25 cm
saldatura:	a piattina larga 8 mm
materiali saldabili:	carta + plastica da sterilizzazione
ingombro:	42 x 30 x 22 cm
peso:	8 kg
alimentazione:	230 V monofase
consumo:	850 W/ora solo durante la saldatura

display digitale nella versione da 45 cm

